



Check lista **poprawnego załadowania** autoklawu / sterylizatora parowego.

- Opakowania papierowo-foliowe ułóż w koszach sterylizacyjnych naprzemiennie, zachowując zasadę folia do folii, papier do papieru.
- Pakiety ułóż luźno, nie przepelniaj kosza powyżej jego górnego brzegu. Powinnaś/powinieneś móc umieścić dłoń pomiędzy ułożone pakiety.
- Miski, naczynia lub butelki ułóż dnem do góry.
- Opakowania z ciężkimi narzędziami umieść na dole.
- Lekkie pakiety umieść na samej górze.
- Nie przepelniaj komory sterylizatora. Przestrzegaj maksymalnych wielkości wsadu określonych przez producenta sterylizatora.
- Uruchom sterylizator zgodnie z zalecanym przez producenta programem do twojego typu wsadu.

Urządzenie zawsze wykorzystuj zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.